

Come utilizzare la convessità

Definizione

La convessità rappresenta la curvatura esterna della placca progettata per interfacciarsi con la cute peristomale. Le placche cutanee convesse favoriscono la corretta adattabilità tra il sistema di raccolta per stomia e la cute peristomale, in situazioni in cui le placche piane non hanno avuto successo. La placca convessa solleva la pelle circostante, distende o appiattisce le pieghe cutanee e aiuta la stomia a sporgere di più.



Stomia al di sotto del livello cutaneo



Posizionamento della placca convessa

Informazioni di carattere generale

- Un sistema di tenuta sicuro e affidabile tra la pelle peristomale e la placca cutanea per stomia è necessario per proteggere la cute sana dagli effluenti della stomia.
- Le placche cutanee possono essere sia convesse che piane. La convessità descrive semplicemente la forma del prodotto
- La convessità può essere suggerita per aumentare il tempo di utilizzo del sistema di raccolta per stomia

Valutazione della convessità

- Una semplice valutazione del paziente può aiutare a stabilire la possibilità di utilizzo di una placca convessa. Consulta l'Hollister Fit Indicator Tool
- La valutazione dei casi in cui è consigliata la convessità deve essere effettuata in collaborazione con un infermiere specializzato in stomia.
- La condizione ideale per la valutazione del paziente è da seduto
- La sacca deve essere rimossa prima della valutazione
- Una valutazione distale della stomia è raccomandata in caso di stomia ad ansa

La convessità può essere utilizzata quando:

- Valutazione della stomia
 - Output della stomia liquido
 - Il foro della stomia si trova in corrispondenza o al di sotto della superficie cutanea
 - Il foro della stomia è in posizione decentrata
 - La stomia sporge per circa $\frac{3}{4}$ oppure è retratta sotto la superficie cutanea
 - La stomia è a filo/retratta durante la peristalsi
- Valutazione peristomale:
 - Il profilo peristomale è irregolare
 - Il tono addominale è flaccido



Stomia con foro decentrato



Stomia retratta



Stomia a livello cutaneo



Stomia Irregolare



Addome Flaccido

Come utilizzare la convessità

Convessità dei prodotti

- La convessità può essere integrata al sistema di raccolta o ottenuta aggiungendo un accessorio alla placca
- La convessità è disponibile nella versione monopezzo o due pezzi
- La convessità è disponibile nella versione ritagliabile o pretagliata
 - N.B: Quando si utilizzano le opzioni ritagliabili per una stomia con forma ovale o irregolare, selezionare una placca con le dimensioni maggiori, in modo che la curvatura convessa sia il più aderente possibile alla stomia
- **La convessità Soft** può essere integrata in un sistema raccolta o creata aggiungendo un anello convesso ad un sistema monopezzo piano (Fare riferimento all' Ostomy Care Tip sugli Anelli Convessi Adapt)
- **La convessità standard**, se necessario, può essere integrata in un sistema di raccolta o creata aggiungendo un anello convesso ad una placca convessa per accentuarne la curvatura

Considerazioni sulla convessità

- La selezione della convessità più adatta può richiedere una rivalutazione regolare dei prodotti utilizzati, delle condizioni della pelle peristomale fino al tempo di utilizzo del sistema di raccolta
- Alcuni infermieri specializzati in stomia suggeriscono l'uso di una cintura per stomia al fine di migliorare l'effetto della convessità. (Fare riferimento ai consigli stoma-care per cinture per stomia Adapt)
- Le seguenti condizioni peristomali non escludono l'uso di prodotti convessi, tuttavia, si raccomanda cautela e una frequente ri-valutazione nei pazienti con:
 - Pioderma Gangrenoso
 - Caput medusae (varici peristomali)
 - Lesione da pressione
 - Malattia di Crohn
 - Ernia Peristomale
- I pazienti dovrebbero essere incoraggiati a contattare un infermiere specializzato in stomia se ci sono alterazioni in corrispondenza della stomia/cute peristomale, perdite nel sistema di raccolta o aumento/perdita di peso.



Placca convessa Soft



Convessità morbida creata con l'aggiunta di un anello convesso ad una placca piana



Placca convessa standard



Placca convessa standard con anello convesso per aumentare la curvatura

Per domande sui prodotti, esigenze di campionatura o domande cliniche dettagliate sui nostri prodotti negli Stati Uniti, chiamare il numero 1.888.808.7456. In Italia chiamare il numero verde 800.836.088

Si raccomanda un follow-up di routine con il proprio operatore sanitario.

Prima di utilizzare qualsiasi prodotto/accessorio per stomia, assicurarsi di leggere gli allegati e le etichette prodotto.

Referenze:

- "Patient Assessment Guidelines for Convexity" – Hollister Incorporated © 2013
- "Developing Patient Assessment Guidelines for Convexity" – Drolshagen et al. 2014 Poster Presentation, WOCN Conference, Nashville TN USA
- "Convex Pouching Systems: Best Practice Document for Patients - WOCN 2012
- Use of Convexity in Pouching – A Comprehensive Review – HoefloekJ, KittschaJ, Purnell P.J.WOCN 2012:40 (5):506-512
- "Adapt Convex Barrier Rings" – Ostomy Care Tip – Hollister Incorporated © 2012
- Lyon, C. & Smith, A. 2010 – Abdominal Stomas and Their Skin Disorders

Il logo Hollister, Secure Start and "Healthy skin. Positive outcomes." sono marchi registrati da Hollister Incorporated. © 2020 Hollister Incorporated. 923066-1217 US-00217

Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048
1.800.323.4060

www.hollister.com

Hollister Limited
95 Mary Street
Aurora, Ontario L4G 1G3
1.800.263.7400