



Catetere intermittente idrofilico pronto all'uso Onli

Guida all'autocateterismo



1
Lavarsi le mani con acqua e sapone neutro e asciugarle bene. Aprire bene le labbra e pulire intorno all'apertura dell'uretra con sapone delicato non profumato o una salvietta detergente non alcolica. Per inserire il catetere, scegliere la posizione più comoda (in piedi, seduti sul WC, sulla sedia a rotelle).



2
Aprire la confezione, tenere saldo il connettore e rimuovere il catetere dalla confezione.




3
Divaricare le labbra con due dita mentre si inserisce il catetere nell'uretra. Tenere il connettore, senza toccare il catetere, e inserire il catetere fino a quando l'urina non inizia a defluire. Una volta che il flusso di urina si è fermato, ritirare lentamente il catetere per assicurarsi che la vescica sia completamente vuota. Rimuovere completamente il catetere.



Catetere intermittente idrofilico pronto all'uso Onli

Guida all'autocateterismo

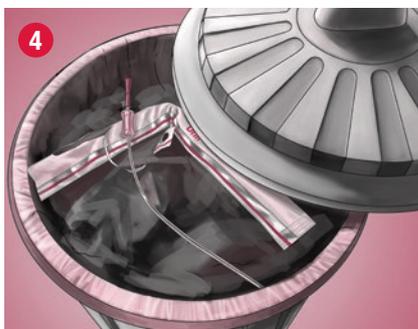

Il catetere può essere gettato tra i normali rifiuti. Non gettare il catetere o la sua confezione nel WC. Lavarsi le mani con acqua e sapone neutro e asciugarle bene.



Alcune posizioni suggerite per la cateterizzazione

La cateterizzazione può essere eseguita in diverse posizioni a seconda della necessità e mobilità personale:

