

Istruzioni per l'Uso dei Cateteri VaPro Plus Pocket™



1. Allestire i materiali e preparare l'area.

2. Lavarsi le mani secondo le indicazioni dell'operatore sanitario.

3. Posizionarsi in maniera tale da eseguire la procedura di cateterismo intermittente. Slacciare gli indumenti in modo tale da avere accesso ai genitali.




4a. Aprire la confezione. Per aprire la confezione, tirare l'apposito anello verso di sé e completamente verso il basso.

4b. Estrarre il catetere dalla confezione.

5. Con la sacca di raccolta rivolta verso l'alto, tenere il catetere in una mano mentre si allontana la sacca dal catetere con l'altra mano per rompere la fascia di carta. Aprire la sacca di raccolta. Lasciare il catetere sul grembo, sul lavabo o su altra superficie piana.



6. Con la mano non dominante, mantenere il pene fino al termine della procedura. Ritrarre il prepuzio (se presente) e detergere il glande, secondo le istruzioni fornite dell'operatore sanitario.

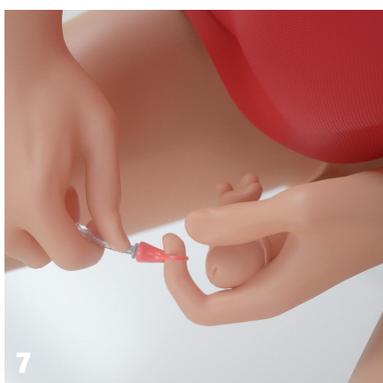

7. Rimuovere il tappo dalla punta di protezione del catetere.

8. Con una mano mantenere il catetere, con l'altra farlo avanzare fino a quando la sua punta non sia inserita tutta all'interno della punta di protezione, facendo attenzione a non far sporgere il catetere della punta.

9. Afferrare il catetere al di sotto della base della punta protettiva.

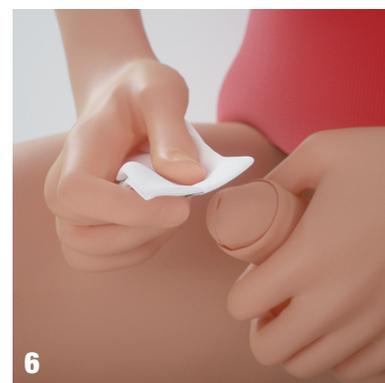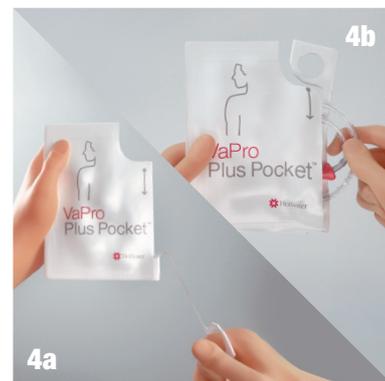

VaPro Plus Pocket™
Catetere Intermittente No-Touch



10. Con tutte le dita della mano non dominante, esercitare una delicata pressione sul glande, in modo tale da aprire l'apertura dell'uretra. Con la mano dominante inserire la punta di protezione fino a quando la base della punta protettiva non entri in contatto con l'apertura dell'uretra.

11. Inserire il catetere fino quando l'urina non inizia a fluire.

12. Quando il flusso dell'urina si è arrestato, estrarre lentamente il catetere. Se il flusso continua, attendere fino al suo arresto. Dopo essersi accertati che la vescica è vuota, rimuovere completamente il catetere. Riposizionare il prepuzio (se presente).

13. Dopo il cateterismo, tenere la sacca di raccolta dall'impugnatura.

14. Per svuotare la sacca di raccolta prima di gettarla via, strappare in corrispondenza della freccia (Tear here to empty) per lo svuotamento.

15. Smaltire il catetere, la sacca di raccolta e la confezione nell'apposito contenitore di raccolta. **NON GETTARE IL CATETERE NEL WC.**

16. Lavare le mani.



AVVERTENZE: Per aiutare a ridurre la possibilità di infezioni e/o altre complicanze, non riutilizzare.

AVVERTENZE: In caso di evidente disagio o di qualsiasi segnale di trauma interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare il proprio operatore sanitario di riferimento.

- Catetere pronto all'uso per cateterismo ad intermittenza, a sistema chiuso, monouso
- Catetere privo di ftalati ricoperto con rivestimento idrofilico
- La punta protetta e la guaina di protezione permettono l'inserimento con tecnica no-touch
- 2 occhielli atraumatici
- Il connettore colorato/codificato per colore indica le dimensioni del catetere
- Cappuccio di protezione facile da rimuovere
- Sacca di raccolta da 1000 mL
- Realizzato senza lattice di gomma naturale

INDICAZIONI PER L'USO

Questo catetere a intermittenza è un dispositivo tubolare flessibile che viene inserito nell'uretra di pazienti sia adulti che pediatrici di sesso maschile allo scopo di drenare l'urina dalla vescica.

PRECAUZIONI: Rivolgersi al proprio operatore sanitario di riferimento prima di effettuare il cateterismo se si verifica una delle seguenti situazioni:

- Uretra lesionata
- Sanguinamento dell'uretra
- Restringimento pronunciato dell'uretra
- False vie
- Uretriti - infiammazioni dell'uretra
- Prostatite - infiammazione della prostata
- Epididimite - infiammazione dell'epididimo

PRECAUZIONI: L'autocateterismo deve essere praticato secondo il piano di cura e i consigli dell'operatore sanitario di riferimento. Seguire sempre le istruzioni per l'uso fornite. Poiché la frequenza di cateterizzazione varia da persona a persona, la frequenza raccomandata di cateterizzazione dovrebbe essere fornita da un operatore sanitario di fiducia. Per qualunque domanda relativa alla cateterizzazione la preghiamo di contattare il suo operatore sanitario di fiducia.

NOTA: Conservare le confezioni in posizione orizzontale ed a temperatura ambiente. Questo prodotto è composto da: film di protezione in poliuretano, punta protetta in termoplastica elastomerica e corpo esente da DEHP.

Hollister SpA

Strada 4 Palazzo A/7
20090 Milanofiori - Assago
Tel. 02.8228181
Fax 800.003760
www.hollister.it

Scannerizzare per guardare il video