

## Continuum sulle alternative delle placche convesse

Le placche convesse sono state progettate per contribuire a fornire una tenuta sicura e affidabile. La selezione delle placche viene effettuata in base alla sporgenza della stomia e analizzando i contorni della cute peristomale. La curvatura esterna della placca cutanea convessa è progettata per interfacciarsi con la cute peristomale.

Questa superficie di interfaccia non dipende solamente dalla profondità, dalla rigidità e dalla pendenza della placca convessa, ma anche dalla forma e dalla rigidità della parete addominale. Ad esempio, una placca convessa soft può piegarsi e seguire i naturali movimenti del corpo; una placca convessa standard non si piega, ma rimane rigida. La scelta del dispositivo più adatto è affidata alla valutazione da parte del clinico del paziente e alla sua competenza sui prodotti per stomia.

### ESEMPIO DI DISPOSITIVO

### POSSIBILI SCENARI DI USI/CASI CLINICI



**Placca Piana**



**Placca Piana**

- Cute peristomale liscia
- Sporgenza adeguata della stomia
- Foro stomia centrato



**Placca piana con anello convesso o ovale**



**Convessità Flessibile**

- Stomia a livello cutaneo
- Piano peristomale piano
- Foro stomia decentrato



**Placca convessa soft**



**Convessità Soft**

- Garantire una leggera pressione intorno alla stomia
- Stomia a livello cutaneo
- Lesione peristomale



**Placca Convessa**



**Convessità Standard**

- Pieghe cutanee intorno alla stomia
- Foro stomia decentrato
- Stomia retratta sotto la superficie cutanea



**Placca Convessa con anello rotondo o ovale**



**Convessità Standard con Maggior profondità**

- Stomia retratta o a filo cutaneo
- Contorni addominali irregolari
- Foro stomia decentrato

## Continuum sulle alternative delle placche convesse

### Referenze:

- 1 J.C. Colwell, M.T. Goldberg, & J.E. Carmel (Eds). (2015). WOCN Society Core Curriculum Ostomy Management. Chapter 10. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer
- 2 JHoeflok, J et al. Use of convexity in ostomy care: Results of an International Consensus Meeting. JWOCN, January/February 2017

Per domande sui prodotti, esigenze di campionatura o domande cliniche dettagliate sui nostri prodotti negli Stati Uniti, chiamare il numero 1.888.808.7456. In Italia chiamare il numero verde 800.836.088

Si raccomanda un follow-up di routine con il proprio operatore sanitario.

Prima di utilizzare qualsiasi prodotto/accessorio per stomia, assicurarsi di leggere gli allegati e le etichette prodotto.

Il logo Hollister, Secure Start and "Healthy skin. Positive outcomes." sono marchi registrati da Hollister Incorporated. © 2017 Hollister Incorporated. 923077-1117 US-00188

**Hollister Incorporated**  
2000 Hollister Drive  
Libertyville, Illinois 60048  
1.800.323.4060

[www.hollister.com](http://www.hollister.com)

**Hollister S.p.A**  
Strada 4 Palazzo A7  
Milanofiori – Assago, Mi  
20090  
800.836.088