




Catetere intermittente idrofilico pronto all'uso Onli



Guida all'autocateterismo



1
Lavarsi le mani con acqua e sapone neutro e asciugarle bene. Usare sapone neutro o salviette detergenti non alcoliche per pulire il glande e l'apertura dell'uretra. Per introdurre il catetere, scegliere la posizione più confortevole (in piedi, seduti sul WC, sulla sedia a rotelle).

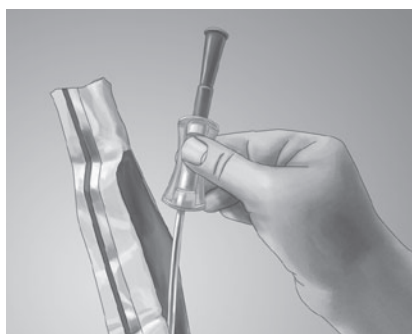

2
Aprire la confezione, tenere saldo il connettore o il gripper per rimuovere il catetere dalla confezione.

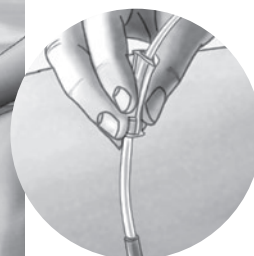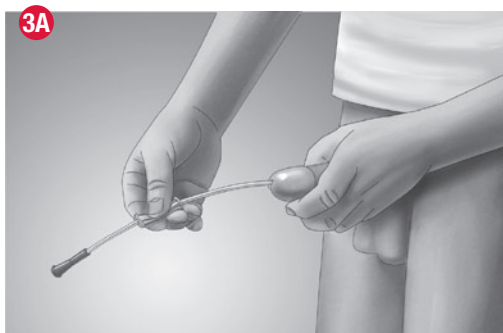


3A
A. Ritrarre il prepuzio, se presente. Tirare il gripper allontanandolo dal connettore. Prendere il prodotto dal gripper (azzurro) senza toccare il tubo. Tenere il pene in posizione eretta con la mano, tenere saldamente il gripper per iniziare a inserire il catetere. Rilasciare leggermente il gripper, e farlo scorrere all'indietro verso il connettore. Quindi prendere saldamente il gripper per fare avanzare il catetere lungo l'uretra. Ripetere l'operazione fino a quando l'urina non inizia a defluire e rilasciare il prepuzio, se presente.





Catetere intermittente idrofilico pronto all'uso Onli

Guida all'autocateterismo

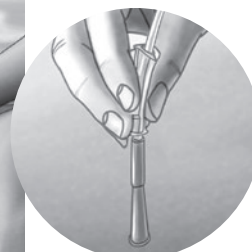

B. Opzione alternativa di inserimento: tenere il gripper "bloccato" sul connettore. Tenere il pene in posizione eretta con la mano, prendere il gripper-connettore e inserire il catetere nell'uretra, fino a che l'urina non inizi a defluire.

Una volta che il flusso di urina si è fermato, ritirare lentamente il catetere per assicurarsi che la vescica sia completamente vuota. Rimuovere lentamente il catetere.

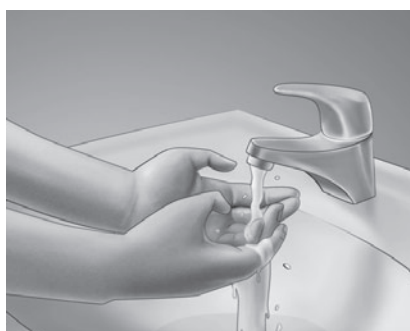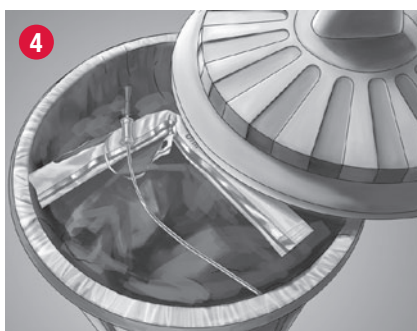

Il catetere può essere gettato tra i normali rifiuti. Non gettare il catetere o la sua confezione nel WC. Lavarsi le mani con acqua e sapone neutro e asciugarle bene.



Alcune posizioni suggerite per la cateterizzazione

La cateterizzazione può essere eseguita in diverse posizioni a seconda della necessità e mobilità personale:

