

Unico



Adesivo Liquido

Riempie e sigilla



Microfibre

Danno forma



Microfilm

Protegge l'idrocolloide

Sicuro



pH provato



Forma perfetta



No forbici

Pratico



Intuitivo



Meno tempo



3 misure, x tutti



Hollister Spa - Strada 4
Palazzo A/7 - Milanofiori
20090 Assago (MI)
Tel. 02.8228181
Fax 02.82281877
www.hollister.it



Riservato esclusivamente agli operatori del settore
Hollister e logo sono marchi registrati da Hollister
Incorporated. © 2016 Hollister Incorporated.

FormaFlex

Per colo, ileo ed urostomia

Si usa con le sacche **Conform 2**




Togliere il film di protezione
Allargare e **dare forma** al foro

*Non arrotolare
Non tagliare
Creare rilievi e pieghe*



Applicare **sulla cute**
e su eventuali
depressioni cutanee

Non applicare sullo stoma

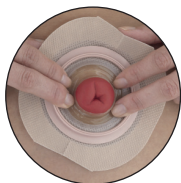

Massaggiare con le dita
I rilievi devono sparire

Controllare il **MicroFilm**
Se non integro risigillarlo



È tutto!

*Fissare la placca
con il bordo adesivo
Applicare la sacca*

Se qualcosa
non va ...
stacca e
riapplica la placca

Articolo	Codice Colore	Flangia	ø foro	Codice CND	Codice ISO
34700	●	45 mm	fino a 32 mm	A100201	Riconducibile 09.18.05.006 colo ed ileo 09.18.08.006 urostomia
35700	●	55 mm	fino a 43 mm		
37700	●	70 mm	fino a 57 mm		